

TENİSÇİ DİRSEĞİ TEDAVİSİNDE YENİ STANDART TEDAVİ YÖNTEMİ



- STANDARDİZE EDİLMİŞ TEDAVİ YÖNTEMİ
- HER İLAÇ İÇİN UYGUN UYGULAMA
- TAM İSABETLİ KİRİŞE ENJEKTE EDİLİR
- HEKİM/ASİSTAN TARAFINDAN YAPILABİLİR

ITEC MEDICAL ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR TRAVMA OLAN TENİSÇİ DİRSEĞİNİN TEDAVİSİ İÇİN TAMAMEN YENİ BİR PATENTLENMİŞ TEDAVİ YÖNTEMİ SUNMAKTADIR.

Anatomik şekillendirilmiş disposable ürün, tercih edilen ilacı 12 mikron iğnelerle tenisçi dirseği olarak ta bilinen Epikondilitin tam ağırlı bölgesine enjekte eder.

Ultrason ile cilt (ilk) işaretleme tam derinliği sonra (alt tendon) bitiş derinliği bitiş sınırında belirlenir ve işaretlenir. Bu derinlik kolayca tedavi masasında ayarlanır.

En sık kullanılan ilaç (işlem görmemiş Otolog Kan 0,5 cc) veya dekstrozdur, fakat birkaç perforajla da sonuç elde edilebilir.



Tedavi standardize edilmiş olup kolayca Hekim veya Asistanı tarafından uygulanabilir.

Hekim hastalarına iyi ve kaliteli bir tedavi sunma imkanına sahip olabilir.


Kol (90 derece) açı ile sehpaye/masaya düz bir şekilde oturmalı.

İğnelerin radius başına gelen kısımları daha kısa anatomik güvenlik için.

Tek İmplant/iğne sağ ve sol kol uygulamasına göre yönlendirme.



Sertifika :
CE 621544/MD 621542

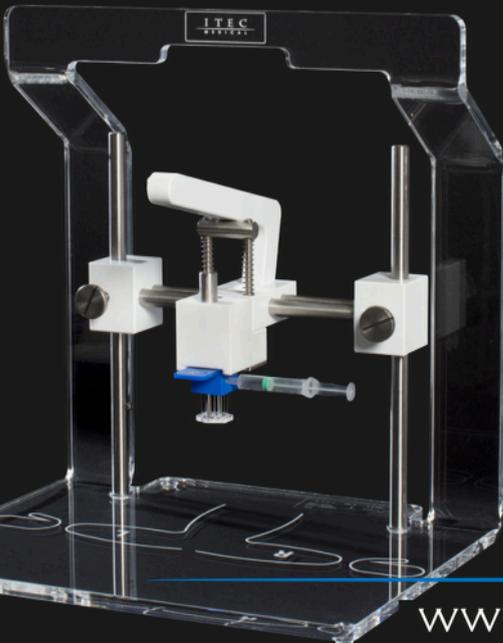

TENİSÇİ DİRSEĞİ TEDAVİSİNDE YENİ STANDART TEDAVİ YÖNTEMİ

HIZLI UYGULAMA KILAVUZ KARTI • ITEC - DİSPOSABLE ÜRÜN

ITEC
MEDICAL



ITEC Cihazı



cildi işaretleyiniz



ultrason derinlik ölçümü



derinliğin tespiti



anestetik spray



veya lokal anestetik enjeksiyon



derinliği belirlemek



kolun cihaza yerleştirilmesi;
omuz 90° abduksiyon,
dirsek 90° fleksiyon



disposable ambalajından çıkartılması



disposable yerleştirilmesi



dirseğin dezenfekte edilmesi



şırınganın yerleştirilmesi



başlangıç pozisyonu :
plakayı cilde dayalı pozisyonlayınız



plastik mesafe belirleyiciyi çıkartınız



cihaz koluna basmak/perforasyonu başlatmak



en derin ayarda enjeksiyon



cihaz kolunu yukarıya kaldırınız



disposable kilidini kaldırınız



disposable çıkartınız



disposable konteynere atınız

WWW.INTEGRAMEDİKAL.COM



IntegraMed
Healthcare Innovations

DİSTRİBÜTÖR

Merdikenköy Mah. Yekta Sok.
Paksa Metroport A Blok
Daire : 2 Göztepe / İSTANBUL
Tel : (0216) 355 72 37
Fax : (0216) 606 13 40
E-Posta : info@integramedikal.com

ITEC Medical B.V.

Institutenweg 25a
7521 PH Enschede
The Netherlands